

OPPERVLAKKEN /
GEBRUIKSKLAAR

ULTRASOL OXY® WIPES



PROTECT

SPORICIDE DOEKJES OP BASIS VAN OXIDATIE

1 / 8

Volledig activiteitsspectrum met korte contacttijden
voor gebruik onder de moeilijkste omstandigheden

Compatibel met bijna **elk materiaal**

Geen giftige of vervuilende **residuen**

Uitstekende reinigingsprestaties



Eén product
voor alle zones



ULTRASOL OXY® WIPES



PRODUCTBESCHRIJVING

2 / 8

ULTRAeffectief. ULTRAsnel. ULTRAcompatibel.

ULTRASOL OXY WIPES zijn zeer effectieve ontsmettingsdoekjes op oxidatieve basis voor het ontsmetten en reinigen van medische hulpmiddelen en medische inventarissen in omgevingen met verhoogde effectiviteitseisen. De doekjes hebben een uitstekend werkingsspectrum tegen bacteriën en virussen, inclusief sporen.

ULTRASOL OXY WIPES laten geen giftige of milieubelastende resten achter op de behandelde oppervlakken en worden gekenmerkt door een zeer goede materiaal compatibiliteit. Hierdoor kunnen de doekjes op bijna alle materialen worden gebruikt.

TOEPASSINGEN EN OPMERKINGEN

Volgens de biocideregeling (BPR)

Voor snelle desinfectie en reiniging van alcoholgevoelige medische apparatuur en oppervlakken van elk type.

Conform EU-verordening medische hulpmiddelen

Voor uiteindelijke desinfectie en reiniging van semikritische medische hulpmiddelen.

Gebruik

Veeg oppervlakken af met tot ze volledig vochtig zijn. Bij routinematig gebruik kunnen de gedesinfecteerde oppervlakken onmiddellijk na het drogen opnieuw worden gebruikt.

Geschikt voor desinfectie van semi-kritische medische hulpmiddelen
Voor de gerichte desinfectie van semi-kritische medische hulpmiddelen moet rekening worden gehouden met de blootstellingstijd voor hergebruik.

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (beschermende handschoenen).

Volg bij gebruik de instructies van de fabrikant van het medische hulpmiddel. Bij het desinfecteren van couveuses voor premature kinderen moeten de KRINKO-richtlijnen in acht worden genomen. Volgens de EU-verordening betreffende medische hulpmiddelen zijn gebruikers/patiënten verplicht om elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan in verband met het hulpmiddel te melden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat waar de gebruiker/patiënt is gevestigd.

Onze **ULTRASOL OXY WIPES XL** zijn dankzij de grotere doekjes bijzonder geschikt voor het desinfecteren van grote oppervlakken. De voorbevochtigde doekjes zorgen voor een comfortabele en tijdbesparende toepassing onder de meest moeilijke omstandigheden.

Houdbaarheid na opening

ULTRASOL OXY WIPES: 42 dagen

ULTRASOL OXY WIPES XL: 42 dagen

Samenstelling

100 g oplossing bevat: 7 g waterstofperoxide, 0,1 g perazijnzuur, 0,1 g glycolzuur.

Materiaal compatibiliteit

Breed scala aan toepassingen op oppervlakken en medische apparatuur.
(zie pagina 4 -6)

Product status

Dubbele registratie (medisch apparaat/biocide)

Voorzorgsmaatregelen en gevarenaanduidingen

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Draag beschermende handschoenen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelen.

Als oogirritatie aanhoudt: Medische hulp/advies inroepen.

Inhoud/verpakking afvoeren naar erkend afvalverwerkingsbedrijf of plaatselijke inzameling.

Alleen voor professioneel gebruik door personeel met overeenkomstige specialistische kennis volgens nationale richtlijnen.

Gebruik ontsmettingsmiddelen veilig.

Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

OPPERVLAKKEN /
GEBRUIKSKLAAR

ULTRASOL OXY® WIPES



PROTECT

EFFECTIVITEITSSPECTRUM EN CONTACTTIJDEN

3 / 8



EFFECTIVITEITSSPECTRUMEN CONTACTTIJDEN *			30 s	1 min	5 min	10 min	15 min
aanbeveling voor desinfectie van oppervlakken							
bactericide ¹ , levurocide ¹	VAH EN ²	met mechanische actie, schoon/bevuild			•		
tuberculocide (M. terrae)	EN 14348	schoon/bevuild			•		
mycobactericide (M. terrae, M. avium)	EN 14348	schoon/bevuild			•		
sporicide tegen C. diff. Roz ² in het medisch gebied	EN 17126	schoon/bevuild			•		
sporocide (B. subtilis, B. cereus)	EN 17126	schoon				•	
	EN 17126	schoon					•
fungicide (A. brasiliensis)	EN 13624	schoon/bevuild			•		
virucide	EN 14476	schoon/bevuild			•		
virucide met beperkt spectrum	EN 14476	schoon/bevuild		•			
aanvullende testresultaten							
bactericide (S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, E. coli ³)	EN 13727	schoon/bevuild	•				
	EN 16615	met mechanische actie, schoon/bevuild			•		
levurocide (Candida albicans)	EN 13624	schoon/bevuild	•				
	EN 16615	met mechanische actie, schoon/bevuild			•		
actief tegen polyomavirus	EN 14476	schoon/bevuild		•			
actief tegen poliovirus	EN 14476	schoon/bevuild			•		
actief tegen norovirus (MNV)	EN 14476	schoon/bevuild		•			
actief tegen adenovirus	EN 14476	schoon/bevuild		•			

* Het werkingsspectrum en de contacttijden gelden zowel voor gebruik als biocide als voor gebruik als medisch hulpmiddel.

1 – inclusief fase 2 stage 1 - en fase 2 stage 2 tests (kwantitatieve suspensie tests en praktische kiemdrager tests).

2 – EN 13624, EN 13727, EN 16615 + 3rd round, VAH Methode 8

OPPERVLAKKEN /
GEBRUIKSKLAAR

ULTRASOL OXY® WIPES



PROTECT

MATERIAAL COMPATIBILITEIT

4 / 8



MATERIAAL METALEN	niet aanbevolen	beperkt aanbevolen	aanbevolen	TOEPASSING PRODUCT VOORBEELD
stainless steel V2A			•	Stoelen voor medisch transport
			•	Rollators
			•	Toilet stoelen
			•	Wandel rekken
aluminum		•		
koper	•			
messing	•			

OPPERVLAKKEN /
GEBRUIKSKLAAR

ULTRASOL OXY® WIPES



PROTECT

MATERIAAL COMPATIBILITEIT

5 / 8



MATERIAAL PLASTICS: ELASTOMEREN	niet aanbevolen	beperkt aanbevolen	aanbevolen	TOEPASSING PRODUCT VOORBEELD
silicones			•	Gezichtsmaskers
			•	Gezichtsmasker met open manchet
			•	Medische toetsenborden en computermuizen
			•	Reanimatie zak
PUR (polyurethane)			•	Stoelen voor medisch transport
CR (neoprene)			•	
EPDM (ethylene propylene diene (monomer) rubber)			•	Verpleegwagens
TPS (styrene TPE)			•	
NBR (nitrile butadiene rubber)			•	

OPPERVLAKKEN /
GEBRUIKSKLAAR

ULTRASOL OXY® WIPES



PROTECT

MATERIAL COMPATIBILITEIT

6 / 8



MATERIAAL PLASTICS: THERMOPLASTICS	niet aanbevolen	beperkt aanbevolen	aanbevolen	OEPASSING PRODUCT VOORBEELD
PC (polycarbonate e.g. Makrolon)				• Ultrasonie apparaten • MRI toestellen • EEG toestellen • ECG toestellen • CT toestellen
PC/ABS (polycarbonate/acrylonitril-butadiene-styrene)				• X-ray toestellen • Echografie sondes zoals transvaginale en abdominale sondes • Incubatoren
ABS (acrylonitril-butadiene-styrene)				• Patient monitoring monitors • Medische toetsenborden en muizen
PEI (polyetherimide)				• Sterilisatie- en transport containers
PMMA (polymethylmethacrylate)				• Incubatoren van acryl en plexiglas
PA (polyamide)				• Manchetvoorbloeddrukmeting
PE-HD (polyethylene-high density)				• Op- en overslagcontainers
PP (polypropylene)				• Slang assemblages
PVC (polyvinylchloride)				• Zuurstofzak • Tas voor oefenpop • Noodtas

OPPERVLAKKEN /
GEBRUIKSKLAAR

ULTRASOL OXY® WIPES



PROTECT

AANKOOP INFORMATIE

7 / 8

Product	Verpakking	Eenheid	Inhoud	Afmeting doekje	REF
ULTRASOL OXY WIPES	Flowpack	6	108 Wipes	20 x 20 cm	00-270-T108
ULTRASOL OXY WIPES XL	Dispenser System	4	120 Wipes	17,5 x 36 cm	00-270-OSEB120

National information may differ. For further information, please contact our subsidiary or your local dealer.

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  C€ 0482

CERTIFICATIES



Dr. Schumacher is gecertificeerd volgens DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, als een gevalideerd milieubeheersysteem volgens EMAS en is lid van IHO, VCI, BAH, DGSV en DGKH.

OPPERVLAK / GEBRUIKSKLAAR

ULTRASOL OXY® WIPES



PROTECT

PRODUCT FAMILIE OVERZICHT

8 / 8



ULTRASOL OXY® WIPES



ULTRASOL OXY® WIPES XL



ULTRASOL OXY®



AANBEVOLEN NON-WOVEN DISPENSERSYSTEMEN



ONE SYSTEM+ PLUS



ONE SYSTEM BASIC



DESCO WIPES



ECO WIPES