

OPPERVLAKKEN /
GEBRUIKSKLAAR

CLEANISEPT® WIPES / MAXI



PREVENT

ALCOHOLVRIJE DOEKJES VOOR SNELLE DESINFECTIE

1 / 9

Universeel, comfortabel en **tijdbesparende toepassing**

Basis, snelle doeltreffendheid en **breed scala aan toepassingen in routinegebieden**

Voor desinfectie van ultrasone sondes
voor abdominale onderzoeken



IHO

ÖGHMP

VAH

OPPERVLAKKEN /
GEBRUIKSKLAAR

CLEANISEPT® WIPES / MAXI



PREVENT

PRODUCT OMSCHRIJVING

2 / 9

CLEANISEPT WIPES zijn alcoholvrije, gebruiksklare desinfectiedoekjes voor snelle desinfectie en reiniging van medische hulpmiddelen en medische apparatuur. De doekjes zijn na opening 90 dagen houdbaar. **CLEANISEPT WIPES** maken een snelle en gemakkelijke toepassing mogelijk, met name voor het desinfecteren en reinigen van ultrasone sondes zonder contact met slijmvliesen. Ze zijn vrij van alcohol en bevatten geen aldehyden of fenolen.

CLEANISEPT WIPES MAXI zijn door hun grote doekjes ideaal voor het desinfecteren en reinigen van middelgrote oppervlakken in de dagelijkse routine. De doekjes kunnen afzonderlijk worden geëxtrudeerd uit de hersluitbare en gebruiksvriendelijke flowpack.

TOEPASSINGEN EN OPMERKINGEN

Volgens de biocideregeling (BPR)

Voor snelle desinfectie en reiniging van alcoholgevoelige medische inventaris en oppervlakken van elk type.

Conform EU-verordening medische hulpmiddelen

Voor snelle desinfectie en reiniging van alcoholgevoelige, niet-invasieve medische hulpmiddelen en ultrasone sondes voor abdominaal onderzoek.

Gebruik

Veeg oppervlakken af met CLEANISEPT WIPES totdat ze volledig vochtig zijn en houd ze vochtig gedurende de gehele contacttijd. Medische hulpmiddelen die tijdens het bedoelde gebruik in contact komen met de huid, moeten na afloop van de inwerktijd 15 seconden worden afgespoeld onder stromend water van geschikte kwaliteit.

Volgens de EU-verordening betreffende medische hulpmiddelen zijn gebruikers/patiënten verplicht om elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan in verband met het hulpmiddel te melden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat waar de gebruiker/patiënt is gevestigd.

Houdbaarheid

Houdbaarheid na opening: 90 dagen

Samenstelling

0,5 g alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchloride, 0,25 g didecyldimethylammoniumchloride.

Materiaal compatibiliteit

Breed scala aan toepassingen op oppervlakken en medische apparatuur. (zie pagina 4 - 7)

Product status

Dubbele registratie (medisch hulpmiddel/biocide)

Goedkeuring fabrikant

Cleanisept Wipes worden aanbevolen voor het desinfecteren van ultrasone apparaten en ultrasone koppen van de volgende fabrikanten:

- Canon Medical/Toshiba
- Fujifilm/SonoSite/Aloka/Hitachi
- Samsung
- Siemens
- esaote
- Philips
- Olympus
- GE Healthcare

Cleanisept Wipes worden aanbevolen voor het desinfecteren van medische hulpmiddelen van de volgende fabrikanten:

- Skai
- Hackebeil GmbH
- Honeywell
- Dr Paul Koch

Raadpleeg voor meer gedetailleerde informatie de productinformatie van de fabrikant of neem contact op.

Voorzorgsmaatregelen en gevaren aanduidingen

Schadelijk voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten.

Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijf spoelen.

Voorkom lozing in het milieu. Inhoud/verpakking afvoeren naar erkend afvalverwerkingsbedrijf of plaatselijke inzameling.

Alleen voor professioneel gebruik door personeel met overeenkomstige specialistische kennis volgens nationale richtlijnen.

Gebruik ontsmettingsmiddelen veilig.
Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

OPPERVLAKKEN /
GEBRUIKSKLAAR

CLEANISEPT® WIPES / MAXI



PREVENT

EFFECTIVITEITSSPECTRUM EN CONTACTTIJDEN

3 / 9



EFFECTIVITEITSSPECTRUM EN CONTACTTIJDEN			30 s	1 min	5 min
Toepassingsaanbeveling voor oppervlaktedesinfectie					
bactericide, levurocide ¹	VAH/EN 16615	met mechanische actie, bevuild		•	
actief tegen omhulde virussen	EN 14476	schoon/bevuild		•	
Additionele test reultaten					
bactericide	EN 16615	bevuild		•	
	EN 13727	bevuild		•	
	EN 1276	bevuild		•	
levurocide (C. albicans)	EN 16615	bevuild		•	
	EN 13624	bevuild		•	
	EN 1650	bevuild		•	
actief tegen papova/SV40 virussen	EN 14476	bevuild			•

1 – inclusief fase 2 stap 1 en fase 2 stap 2 tests (kwantitatieve suspensietests en kwantitatieve draagproeven)

OPPERVLAKKEN /
GEBRUIKSKLAAR

CLEANISEPT® WIPES / MAXI



PREVENT

MATERIAAL COMPATIBILITEIT

4 / 9



MATERIAAL METALEN	niet aanbevelen	beperkt aanbevelen	aanbevelen	TOEPASSING PRODUCT VOORBEELD
stainless steel V2A			•	Medische transportstoelen
			•	Transportwagens
			•	Rollators
aluminum			•	
messing	•			Stethoscoop (verchroomd messing)
koper	•			

OPPERVLAKKEN /
GEBRUIKSKLAAR

CLEANISEPT® WIPES / MAXI



PREVENT

MATERIAAL COMPATIBILITEIT

5 / 9



MATERIAAL PLASTICS: ELASTOMEREN	niet aanbevelen	beperkt aanbevelen	aanbevelen	TOEPASSING PRODUCT VOORBEELD
PUR (polyurethane)			•	Medisch transport stoelen
			•	Dashboards
silicones			•	Gezichtsmaskers
			•	Gezichtsmasker met open manchet
			•	Medische toetsenborden en muizen
EPDM (ethylene propylene diene (monomer) rubber)		•		Verpleegwagentjes
CR (neoprene)		•		

OPPERVLAKKEN /
GEBRUIKSKLAAR

CLEANISEPT® WIPES / MAXI



PREVENT

MATERIAAL COMPATIBILITEIT

6 / 9



MATERIAAL PLASTICS: THERMOPLASTICS	niet aanbevelen	beperkt aanbevelen	aanbevelen	TOEPASSING PRODUCT VOORBEELD
PA (polyamide)			•	Röntgenbuizen
PE-HD (polyethylene-High Density)			•	Opslag- en transportcontainers
PVC (polyvinylchloride)			•	
PMMA (polymethylmethacrylate)			•	Acryl en plexiglas, couveuses
POM (polyoxymethylene)			•	Zitschalen
PSU (polysulfone)			•	
EPP (expanded (foamed) polypropylene))			•	Fasciarollen
PC (polycarbonate e.g. Makrolon)		•		Parfumeerders
		•		Ultrasonie apparaten
ABS (acrylonitril-butadiene-styrene)		•		Röntgenapparatuur
		•		Patiëntbewakingsmonitoren

OPPERVLAKKEN /
GEBRUIKSKLAAR

CLEANISEPT® WIPES / MAXI



PREVENT

MATERIAAL COMPATIBILITEIT

7 / 9



MATERIAAL TEXTIEL	niet aanbevolen	beperkt aanbevolen	aanbevolen	TOEPASSING PRODUCT VOORBEELD
synthetisch leer (bijv. met PVC en PUR toplaag)				Behandel- en onderzoeksbanken
				Opberghulp
				Gynaecologische onderzoeksstoel
				Tandartsstoelen
				Operatietafels
				Bedden voor patiëntentransport

OPPERVLAKKEN /
GEBRUIKSKLAAR

CLEANISEPT® WIPES / MAXI



PREVENT

AANKOOPINFORMATIE

8 / 9

Product	Verpakking	Leverings eenheid	Inhoud	Art. Nr.
CLEANISEPT WIPES	Dispenser	12	100 wipes	00-208-D100-01
	Refill	12	100 wipes	00-208-R100-01
CLEANISEPT WIPES MAXI	Flowpack	6	100 wipes	00-208-T100

Nationale informatie kan afwijken. Neem voor meer informatie contact op met onze dochteronderneming of uw plaatselijke dealer. De beschikbaarheid van de producten en containermaten is afhankelijk van een ingevulde nationale registratie.

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  **CE 0482**

CERTIFICATEN



Dr. Schumacher is gecertificeerd volgens DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, heeft een gevalideerd milieubeheersysteem volgens EMAS en is lid van IHO, VCI, BAH, DGSV en DGKH.

OPPERVLAKKEN /
GEBRUIKSKLAAR

CLEANISEPT® WIPES / MAXI



PREVENT

PRODUCT OVERZICHT

9 / 9



CLEANISEPT WIPES



CLEANISEPT WIPES



CLEANISEPT WIPES



CLEANISEPT



AANBEVOLEN NON-WOVEN DISPENSERSYSTEMEN



ONE SYSTEM+ PLUS



ONE SYSTEM BASIC



DESCO WIPES



ECO WIPES