

OPPERVLAKKEN /
GEBRUIKSKLAAR

DESCOCEPT SENSITIVE



PRESERVE

ALCOHOLISCH SNEL DESINFECTIEMIDDEL

1 / 10

Efficiënte desinfectie en reiniging
met lange levensduur

Brede waaier aan toepassingen
voor dagelijks gebruik

Zeer goede materiaalcompatibiliteit
met laag ethanolgehalte

Uitermate geschikt
voor gebruik in de voedingsindustrie



Goedgekeurd voor
gebruik in HACCP-
concepten

DESCOCEPT SENSITIVE



PRODUCT OMSCHRIJVING

2 / 10

Veelzijdig gebruik op oppervlakken en medische apparatuur

DESCOCEPT SENSITIVE is een gebruiksklaar, snel ontsmettingsmiddel op alcoholbasis, gebaseerd op ethanol, voor zachte ontsmetting en reiniging van medische apparatuur en allerlei oppervlakken. Het product is met name geschikt voor ruimten in de buurt van patiënten waar een breed werkingsspectrum vereist is.

TOEPASSINGEN EN OPMERKINGEN

Volgens de biocideregeling (BPR)

Snelle desinfectie en reiniging van alcoholbestendige medische inventaris en alle soorten oppervlakken, voornamelijk in de buurt van patiënten.

Conform EU-verordening medische hulpmiddelen

Voor snelle desinfectie en reiniging van niet-invasieve medische hulpmiddelen, speciaal geschikt voor gevoelige oppervlakken van medische hulpmiddelen.

Gebruik

Om volledige bevochtiging te verzekeren, breng de onverdunde oplossing gelijkmatig aan op oppervlakken die bestand zijn tegen alcohol en houd ze vochtig gedurende de vereiste contacttijd.

Als het oppervlak sterk verontreinigd is, moet het aanwezige materiaal onmiddellijk mechanisch verwijderd worden en mag het oppervlak pas daarna gedesinfecteerd worden.

Volgens de EU-verordening betreffende medische hulpmiddelen zijn gebruikers/patiënten verplicht om elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan in verband met het hulpmiddel te melden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat waar de gebruiker/patiënt is gevestigd.

Toepassingen

DESCOCEPT SENSITIVE kan worden gebruikt voor wisdesinfectie of als spray. Geschikt voor gebruik in de voedingssector.

Samenstelling

100 g oplossing bevat: 45 g ethanol.

Materiaal compatibiliteit

Naast een effectieve desinfectie binnen een zeer korte tijd, heeft het product een zeer goede materiaalcompatibiliteit. Breed scala aan toepassingen op oppervlakken en medische apparatuur. (zie pagina 5 - 8)

Voorzorgsmaatregelen en gevaren aanduidingen

Ontvlambare vloeistof en damp. Als medisch advies nodig is, houd dan de product verpakking of het etiket bij de hand. Buiten bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Verpakking goed gesloten houden. Damp/spuitnevel niet inademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig spoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijf spoelen. Inhoud/verpakking afvoeren naar erkend afvalverwerkingsbedrijf of plaatselijke inzameling.

OPPERVLAKKEN /
GEBRUIKSKLAAR

DESCOCEPT SENSITIVE



PRESERVE

EFFECTIVITEITSSPECTRUM EN CONTACTTIJDEN

3 / 10



EFFECTIVITEITSSPECTRUM EN CONTACTTIJDEN			30 s	1 min	2 min	3 min
aanbeveling voor desinfectie van oppervlakken (doekjes desinfectie)						
bactericide, levurocide ^h	VAH/EN ^{2,3}	met mechanische actie, schoon/bevuild			•	
tuberculocide (M. terrae)	EN 14348	schoon/bevuild		•		
mycobactericide (M.terrae, M.avium)	EN 14348	schoon/bevuild			•	
virucide met beperkt spectrum	EN 14476	schoon				•
actief tegen omhulde virussen	EN 14476	schoon/bevuild	•			
aanbeveling voor desinfectie van oppervlakken (spray desinfectie)						
bactericide, levurocide ^{h,4}	EN 17387	met mechanische actie, bevuild		•		
bactericide, levurocide ^{h,5}	EN 13697	zonder mechanische actie, schoon/bevuild		•		
tuberculocide (M. terrae)	EN 14348	schoon/bevuild		•		
mycobactericide (M.terrae, M.avium)	EN 14348	schoon/bevuild			•	
virucide met beperkt spectrum	EN 14476	zonder mechanische actie, schoon				•
	EN 16777	zonder mechanische actie, schoon				•
actief tegen omhulde virussen	EN 14476	zonder mechanische actie, schoon		•		
	EN 16777	zonder mechanische actie, schoon		•		

1 – inclusief fase 2 step 1 en fase 2 step 2 tests (kwantitatieve suspensietests en kwantitatieve draagproeven)

2 – EN 16615, EN 13727, EN 13624, VAH Methode 8

3 – VAH vermeld 5 minuten

4 – medisch

5 – industrie, voeding, huishouden, openbare instellingen

OPPERVLAKKEN /
GEBRUIKSKLAAR

DESCOCEPT SENSITIVE



PRESERVE

EFFECTIVITEITSSPECTRUM EN CONTACTTIJDEN

4 / 10



EFFECTIVITEITSSPECTRUM EN CONTACTTIJDEN			30 s	1 min	2 min	3 min
aanvullende resultaten						
bactericide	EN 16615	bevuild			•	
	EN 13697	schoon	•			
		bevuild		•		
	EN 13727	bevuild		•		
	EN 1276	bevuild	•			
levurocide (C. albicans)	EN 16615	bevuild			•	
	EN 13697	schoon/bevuild	•			
		schoon/bevuild		•		
	EN 13624	bevuild		•		
	EN 1650	bevuild	•			
actief tegen adenovirus	EN 14476	schoon				•
	EN 16777	met mechanische actie, bevuild				•
actief tegen norovirus (MNV)	EN 14476	schoon/bevuild		•		
	EN 16777	zonder mechanische actie, bevuild				•
actief tegen vaccina virus	EN 14476	schoon/bevuild	•			
	EN 16777	met mechanische actie, bevuild		•		
actief tegen coronavirus	EN 14476	bevuild	•			

OPPERVLAKKEN /
GEBRUIKSKLAAR

DESCOSEPT SENSITIVE



PRESERVE

MATERIAAL COMPATIBILITEIT

5 / 10



MATERIAAL METALEN	niet aanbevolen	beperkt aanbevolen	aanbevolen	TOEPASSING PRODUCT VOORBEELD
Stainless steel V2A			•	Stoelen voor medisch vervoer
			•	Toiletstoelen
			•	Rollators
			•	Wandelrekken
Koper			•	
Anodized aluminum			•	Containers voor instrumenten
			•	Steriele containers
Messing		•		Luer lock adapter
		•		Stethoscoop (verchroomd messing)
Aluminum		•		

OPPERVLAKKEN /
GEBRUIKSKLAAR

DESCOSEPT SENSITIVE



PRESERVE

MATERIAAL COMPATIBILITEIT

6 / 10



MATERIAAL PLASTICS: ELASTOMEREN	niet aanbevelen	beperkt aanbevelen	aanbevelen	TOEPASSING PRODUCT VOORBEELD
CR (chloroprene rubber)			•	
PUR (polyurethane)			•	Stoelen voor medisch vervoer
EPDM (ethylene propylene diene (monomer) rubber)			•	Verpleeg trolleys
MQ (polydimethylsilicone rubber)			•	
VMQ (polymethylsiloxane vinyl rubber)			•	Mondmaskers
PVMQ (polymethylsiloxane-phenyl vinyl rubber)			•	Medische toetsenborden en muizen



MATERIAAL COMPATIBILITEIT

7 / 10



MATERIAAL PLASTICS: THERMOPLASTICS	niet aanbevelen	beperkt aanbevelen	aanbevelen	TOEPASSING PRODUCT VOORBEELD
PC (polycarbonate e.g. Makrolon)			•	Ultrasone apparaten
			•	ECG apparaten
			•	EEG apparaten
			•	MRI apparaten
			•	X-ray apparaten
PC/ABS (polycarbonate/acrylonitril-butadiene-styrene)			•	HF-chirurgie behuizingcomponenten
			•	Abdominale ultrasone sondes
			•	Parfumeerders
			•	Incubatoren
			•	Patiëntbewakingsmonitoren
ABS (acrylonitril-butadiene-styrene)			•	Medische toetsenborden en muizen
			•	Opslag- en transport containers
PE-HD (polyethylene-High Density)			•	Zitschalen
POM (polyoxymethylene)			•	Röntgenschalen
PA (polyamide)			•	Fascia rollen
EPP (expanded (foamed) polypropylene)				
PET (polyethylene terephthalate)			•	
PMMA (polymethylmethacrylate)	•			Acrylic en plexiglas, incubators

OPPERVLAKKEN /
GEBRUIKSKLAAR

DESCOCEPT SENSITIVE



PRESERVE

MATERIAAL COMPATIBILITEIT

8 / 10



MATERIAAL TEXTIEL	niet aanbevelen	beperkt aanbevelen	aanbevelen	TOEPASSING PRODUCT VOORBEELD
synthetisch .g. met PVC en PUR top laag)				- Onderzoeks- en behandelbanken - Opslagsteun - Gynaecologische onderzoeksstoel - Tandarts stoelen - Operatietafels - Transporttafels voor patiënten

OPPERVLAKKEN /
GEBRUIKSKLAAR

DESCOCEPT SENSITIVE



PRESERVE

AANKOOPINFORMATIE

9 / 10

Product	Verpakking	Leveringseenheid	Inhoud	Art. Nr.
	Spray fles	6	750 ml	00-323DS-0075-02
	Fles	10	1 L	00-323DS-010
	Bus	3	5 L	00-323DS-050

Nationale informatie kan afwijken. Neem voor meer informatie contact op met onze dochteronderneming of uw plaatselijke dealer. De beschikbaarheid van de producten en containermaten is afhankelijk van een ingevulde nationale registratie.

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 CE 0482

CERTIFICATEN



Dr. Schumacher is gecertificeerd volgens DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, heeft een gevalideerd milieubeheersysteem volgens EMAS en is lid van IHO, VCI, BAH, DGSV en DGKH.

OPPERVLAKKEN /
GEBRUIKSKLAAR

DESCOCEPT SENSITIVE



PRESERVE

PRODUCT OVERZICHT

10 / 10



DESCOCEPT SENSITIVE WIPES



DESCOCEPT SENSITIVE WIPES



DESCOCEPT SENSITIVE WIPES XL



DESCOCEPT SENSITIVE



DESCOCEPT SENSITIVE



AANBEVOLEN NON-WOVEN DISPENSERSYSTEMEN



ONE SYSTEM+ PLUS



ONE SYSTEM BASIC



DESCO WIPES



ECO WIPES